


laufwerk
Technische Orthopädie

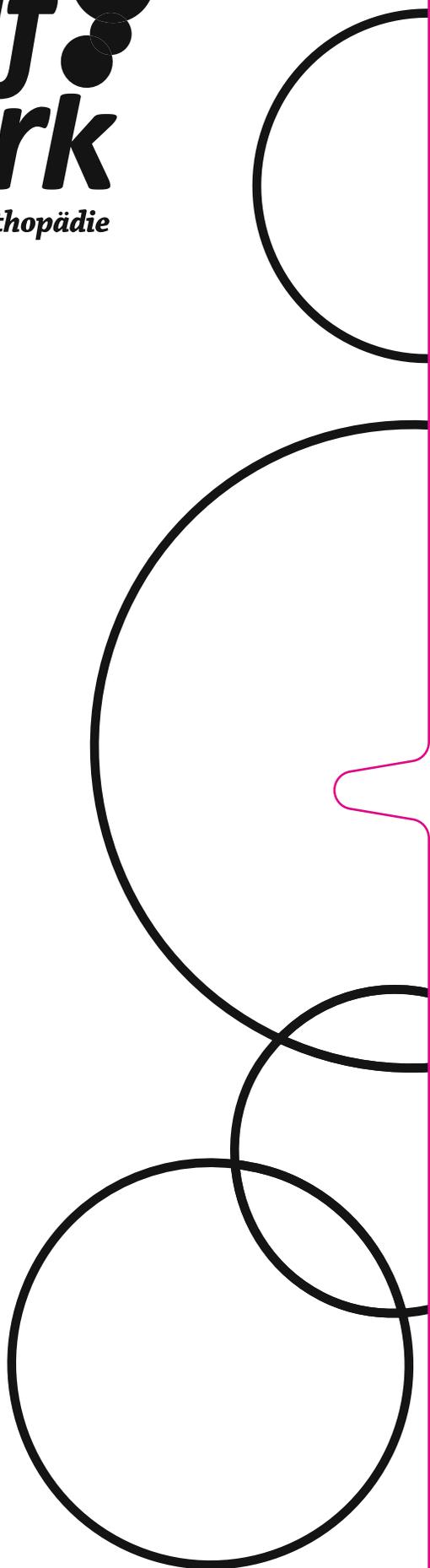

GEBRAUCHSANWEISUNG EINLAGEN

Ihre orthopädischen Schuheinlagen sind hochwertige Hilfsmittel, die wir in Handarbeit individuell für Ihre Füsse angefertigt haben.

EINSATZ UND GEBRAUCH

Verwenden Sie Ihre Einlagen ausschliesslich in geeignetem Schuhwerk.

Ihre Füsse benötigen eventuell eine schrittweise Eingewöhnung an die Einlagen.

Bei Hautrötungen oder Druckbeschwerden wenden Sie sich bitte umgehend an uns.

SCHUHE UND EINLAGENTYP

Für optimale Ergebnisse sollten Schuhe und Einlagen perfekt aufeinander abgestimmt sein.

Am besten eignen sich Einlagenschuhe oder Schuhe mit herausnehmbarem Fussbett.

Achten Sie darauf, dass die Schuhe gut passen, um eine effektive Nutzung sicherzustellen.

Die Schuhe müssen einen festen Fersensitz bieten und dürfen weder zu eng noch zu kurz sein.

REINIGUNG UND PFLEGE

Lassen Sie die Einlagen langsam trocknen, wenn sie feucht geworden sind und vermeiden Sie eine direkte Wärmequelle.

Erhitzen Sie die Einlagen nicht über 50°C.

Reinigen Sie Microfaser- und Kunststoffbezüge mit einem feuchten Tuch oder einem milden Desinfektionsmittel.

Unsere Materialien sind geprüft und zertifiziert, um allergische Reaktionen weitgehend auszuschliessen. Sollten dennoch Reaktionen auftreten, kontaktieren Sie uns bitte sofort.

Lassen Sie Ihre Einlagen regelmässig von uns überprüfen, um Abnutzung oder Funktionsminderungen rechtzeitig zu erkennen – besonders bei Kindern im Wachstum und bei speziellen Indikationen wie Diabetes.

Für Fragen und weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Laufwerk GmbH
Siebenmatten 1b
5032 Aarau Rohr

Telefon 062 823 31 35
www.laufwerk-aarau.ch

**lauf
werk**
Technische Orthopädie